

タイムシフト
TIMESHIFT®

男性用尿ケア製品

新感覚!

尿ケア革命

尿モレでお困りの方へ

- ✓ お仕事の時に
- ✓ ドライブやレジャーに
- ✓ 長時間トイレに
いけない



超軟伸性

素材

快適

臭い

漏れ

日本製

漏れない!

柔らかく伸びる!

装着時の違和感0!

何度も溜められる!

TIMESHIFT®は、漏れた尿を製品本体に溜め、
トイレで普段通りに用を足すように捨てることのできる
男性用尿ケア製品です。

超軟性素材で装着の違和感なし



通常時(伸ばす前)



柔らかく伸びる!

マシュマロよりも柔らかい



マシュマロの硬度=約5
(ゴム硬度計Eタイプ)




当社素材
=柔らかすぎて測定不能


柔らかい・伸びる・溜められる・逆止弁

当社製品は全体を硬度ゼロの材質で構成しており、違和感が少ないのが特徴です。
生体内の構造からヒントを得た斬新な方法で機能設計・開発しております。
下図は、人間の大腿静脈弁をヒントに開発した逆止弁です。


(i) 閉じた状態

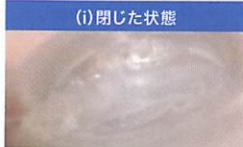

(ii) 奥から手前の水流で開く弁

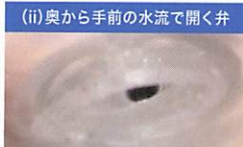

(iii) 再び閉じた状態

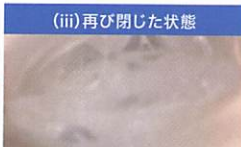

-着けたまま、簡単尿ケア-


一日のはじめに装着したら、定期的に尿を捨てるだけ。
コックを開栓するだけで処理が可能です。



集尿前

集尿後
300~500ml


ご使用方法

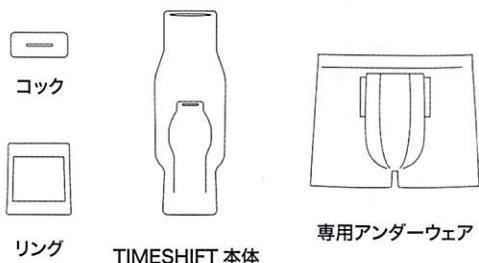

使用するもの

TIMESHIFTの装着には、本体と付属品の
リング・コック、(立ち歩いてのご使用の場合は)
専用アンダーウェアが必要です。

詳しい装着方法はこちら

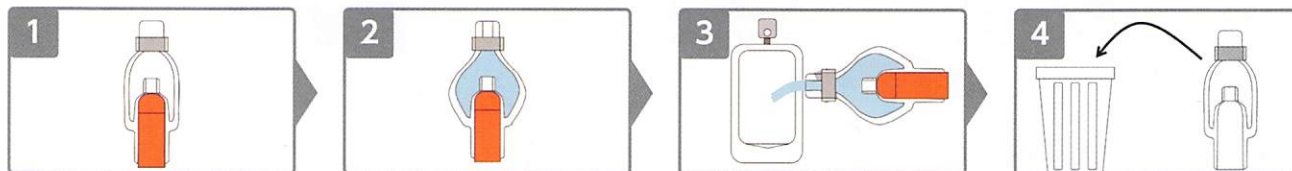

1 マニュアルを読んで、正しく装着
します。

2 製品に排尿します。溜められる
量は、排尿2回分が目安です。
※1回の排尿量150mlの場合

3 装着したまま尿を排出します。空に
した製品は繰り返し使用が可能
です。使用開始から12時間程度で
取り外してください。

4 取り外したら廃棄します。トイレに
製品を流さないでください。

		商品名	JAN	品番	定価(税別)	ケース入数	JAN
TIMESHIFT (一般販売仕様版)		TIMESHIFT(標準)	4595555476012	TS-02M-STD	1,000	5×6箱 (30入)	
		TIMESHIFT(スリム)	4595555476029	TS-02M-SLM	1,000	5×6箱 (30入)	
TIMESHIFT (業務用販売仕様版)		TIMESHIFT(標準)	4595555476036	TS-02M-STD-B	1,000	5×6箱 (30入)	
		TIMESHIFT(スリム)	4595555476043	TS-02M-SLM-B	1,000	5×6箱 (30入)	
専用 アンダーウェア		TIMESHIFT専用 アンダーウェア S (ウエストサイズ:68~76cm)	4549707496380	TS-UW-S	4,800	2枚入	
		TIMESHIFT専用 アンダーウェア M (ウエストサイズ:76~84cm)	4549707496397	TS-UW-M	4,800	2枚入	
		TIMESHIFT専用 アンダーウェア L (ウエストサイズ:84~94cm)	4549707496403	TS-UW-L	4,800	2枚入	
		TIMESHIFT専用 アンダーウェア LL (ウエストサイズ:94~104cm)	4549707496410	TS-UW-LL	4,800	2枚入	

本製品は介護の尿ケアにも使用できます

- ・尿が皮膚にほとんど触れず清潔・快適
- ・オムツ交換の負担を大幅に軽減
- ・ゴミを大幅に削減

